



HET NEMEN VAN EEN MESTMONSTER

1. Neem een monster altijd minimaal 2 weken na de laatste ontworming.
2. Zorg bij elk monster voor schone handen of gebruik een nieuwe wegwerphandschoen.
3. Neem het mestmonster altijd van zo vérs mogelijke mest.
4. Eén (1) mestbal van een paard is ruim voldoende! Neem van pony's 2 mestballen. (Voor de standaardwormentest is maar 4 gram nodig; voor de leverbottest 15 gram).
5. Neem een monster van de bovenop liggende mestballen die niet met de grond in aanraking zijn geweest.
6. Zorg dat u er zeker van bent dat de mest afkomstig is van het te onderzoeken paard.
7. Neem de afsluitbare seal-bag en vul dit met één mestbal (pony's 2). Meer is niet nodig voor de analyse(s). Gebruikt u een potje voor de verzending, dat geldt dit ook.
8. Sluit de seal-bag of het potje goed af. Extra zakjes en / of plakbandjes e.d. zijn echt overbodig en maken bemonstering erg lastig !
9. Vul de naam van het paard in op het etiket en volg onderstaande stappen voor seal-bags / potjes:
 - Plaats de seal-bag, met het absorberend materiaal er omheen, in de kartonnen houder.

NB: het absorptievel **NIET IN** de seal-bag doen !

 - Plaats het geheel in de blauwe verzend-enveloppe. Voeg de ingevulde vragenlijst bij in de envelop.
 - (Op de blauwe envelop staat ook "buisjes" vermeld, dit is bij ons niet van toepassing omdat we seal-bags gebruiken).
 - **Of:** Plaats de potjes in de verzenddoos en voeg de ingevulde vragenlijst toe.
10. Verwijder de plakstrip en sluit de verzendenveloppe of -doos goed af. Het geheel is nu geschikt om **postzegels op te plakken** en dan te verzenden.
11. **NB:** Een envelopverzending is in NL en Be toegestaan tot **30 mm** hoogte (/ dikte) van de envelop !



Succes!